

## ECOPLAST 2000 S.a.s.

Via Gioele Solari, 124 - 00166 - ROMA

codice fiscale e partita iva 05760021005

tel 06.66181103 fax 06.66180353

email info@ecoplast2000.it pec ecoplast2000@pec.it

web ecoplast2000.it



### Rifiuti Ospedalieri Lt 4

Cod.

005409



Codice	005409
Materiale	PP COP - Polipropilene copolimero
Colore	Giallo
Pallet [pz]	900
Capacità [l]	3,8
Diametro inf [mm]	170
Diametro sup [mm]	200
Altezza [mm]	150
Versione	Taglienti e Pungenti
Specifiche	Tappo provvisorio + tappo definitivo
Normative	Conforme alla norma BS-7320 1990
Omologazioni	S0345-14
Spessore	1,9 mm
Riciclabile [±%]	100
Confezione [pz]	1000

#### Secchiello Troncoconico per Aghi e Rifiuti Taglienti

Contenitore professionale per lo smaltimento di aghi e siringhe, realizzato in **PP COP (Polipropilene copolimero)**. Il materiale è specificamente studiato per essere **imperforabile** e garantire una tenuta ermetica, offrendo massima sicurezza e praticità durante l'uso in ambito sanitario.

#### Caratteristiche Tecniche

- **Resistenza e Sicurezza:** Struttura resistente alla perforazione da parte di oggetti acuminati e taglienti.
- **Sterilizzazione:** Il contenitore è **autoclavabile fino a 134°C**, permettendo la sterilizzazione prima dello smaltimento finale.
- **Sostenibilità Ambientale:** Progettato per lo smaltimento tramite incenerimento; durante il processo libera solo acqua e anidride carbonica, senza produrre tossicità residue.
- **Conformità:** Prodotto conforme alla normativa **BS-7320 1990**.

#### Istruzioni d'Uso e Dispositivi di Sicurezza

- **Sistema di Separazione:** Dotato di tacche a "V" e foro "a margherita" integrati per facilitare la rimozione sicura dell'ago dal corpo della siringa.
- **Doppia Chiusura:**
  - **Provvisoria:** Utilizzando il tappo con la parte concava rivolta verso il basso.

- **Definitiva:** Sigillatura irreversibile per il trasporto allo smaltimento.
- **Ergonomia:** Munito di manico rinforzato per una movimentazione agevole e sicura.

#### **Avvertenze Fondamentali**

- \* Non utilizzare il contenitore senza aver prima montato il coperchio.
- \* Rispettare rigorosamente il **livello di riempimento** indicato dalla tacca laterale.
- \* Non tentare mai di estrarre oggetti dal contenitore o di riaprirlo una volta sigillato definitivamente.

Le immagini qui contenute sono rappresentative e non vincolano il fornitore né per la forma costruttiva né per il colore, né per altre caratteristiche costruttive. Ecoplast2000 s.a.s ha piena facoltà di apportare modi che o sostituire i prodotti senza preavviso. Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza delle informazioni qui riportate e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori al prodotto principale.

Copyright © ECOPLAST 2000 S.A.S.  
Riproduzione vietata per foto e descrizioni